


Aide-mémoire utilisation de la pompe volumétrique  
«PLUM 360 avec MedNet»

**Ouvrir la pompe**


- Appuyer sur  pour allumer la PLUM 360
- Attendre que l'autotest et que la vérification de la cassette soient complétés
- Sélectionner une **USC** (unité de soins clinique) à l'aide des flèches puis appuyer sur **Cholsir** pour confirmer

**Note:** Le message "Nouv. Patient?" apparaîtra si:

- ✓ La programmation n'a pas été effacée auparavant et qu'il s'est écoulé moins de 5 heures depuis la fermeture de la pompe.
- ✓ La porte de la pompe a été ouverte puis refermée

**Attention:** un «Oul» effacera **TOUT**.

**Programmation de la voie A**

- Sélectionner → **A**
- Sélectionner un médicament (Page préc. ou suivante pour changer de page)
- Entrer 2 des 3 valeurs (Débit/Dose, volume à perfuser «VAP», Durée) et le calcul de la 3e valeur se fera automatiquement.
- Appuyer → **Début** 
- Confirmer le programme

**Pour visualiser la programmation ou le VAP restant:**

- Sélectionner la voie (A ou B)
- **VAP** : Volume restant dans le sac
- **Durée** : Temps restant à la perfusion

**Modification du débit**


- Sélectionner la voie nécessitant une modification du débit
- S'assurer d'être sur la bonne ligne et entrer le nouveau **Débit**
- Appuyer → **Début**
- Confirmer la programmation

**Programmation de la voie B**

- Sélectionner → **B**
- Sélectionner un médicament
- Entrer 2 des 3 valeurs (Débit/Dose, VAP, Durée) et le calcul de la 3e valeur se fera automatiquement.
- Sélectionner → **Alterné** ou **Simultané** (avec la touche **Changer de mode**)
- Appuyer → **Début**
- Confirmer le programme

**Note:** En mode Simultané, une alarme sonnera lorsque le VAP de B sera atteint.

**Cesser une perfusion**

- Appuyer → **Arrêt** 
- Sélectionner la /les voie(s) à arrêter (si applicable)


### **Changement de sac (VAP)**

- o **Changer le sac physiquement**
- o Sélectionner la voie → A
- o Entrer le nouveau VAP
- o Appuyer → Début
- o Confirmer le programme

### **Effacer les volumes perfusés**

- o Sélectionner → Réglages/Vol./USC
- o Choisir → Volumes de perf.
- o Appuyer → Effacer A ou B ou le total pour effacer les volumes perfusés

### **Verrouillage**

- o Appuyer sur 
- o Mot de passe → «XXXX» puis Entrer
- o Déverrouiller en entrant de nouveau le mot de passe

### **Modifier l'USC pendant que la pompe perfuse:**

- o Sélectionner → Réglages/Vol./USC
- o Sélectionner → Changer USC
- o Sélectionner le nouvel USC et appuyer → Entrer

**Note:** Les perfusions en cours demeureront sous l'USC précédant jusqu'à ce que le VAP = 0 ou jusqu'à ce que vous cessiez les perfusions et effaciez les programmations.

### **Le médicament voulu n'est pas dans la liste (pas protégé par MedNet):**

- o Appuyer → médicaments → Aucun médicament sélectionné (1<sup>re</sup> ligne)
- o Choisir l'unité de mesure
- o Entrer 2 des 3 valeurs (Débit/Dose, VAP, Durée) et le calcul de la 3e valeur se fera automatiquement.
- o Appuyer → Début
- o Confirmer le Programme


**Note:** À utiliser seulement en cas de nécessité absolue

### **Atteinte des limites franchissables et infranchissables**

#### **Atteinte d'une limite franchissable**

- o Vous aurez le message:
  - Dose > x dépasse lim. franchissable? Oui : OK Non : Modifier
  - Dose < x dépasse lim. franchissable? Oui : OK Non : Modifier
- o Appuyer → Oui ou Non
- o Confirmer la programmation

#### **Atteinte des limites infranchissables**

- o Vous aurez le message:
  - Dose limite max. infranchissable de x. [C] pour Effacer.
  - Dose limite min. infranchissable de x. [C] pour Effacer.
- o Appuyer →  pour effacer
- o Entrer le bon Débit/Dose
- o Appuyer → Début
- o Confirmer la programmation